



ticare
TISSUE CARE PHILOSOPHY

CE
0120

INSTRUCCIONES DE USO RECAMBIO FILTRO RECOLECTOR (13109110)

1. DESCRIPCIÓN:

Utilizando el recolector de hueso durante la osteotomía con sierras, piezas de mano, regularizaciones de crestas e instrumentalización de alveolos implantarios, obtendremos gran cantidad de material de injerto para reparar distintos tipos de tejidos. COMPONENTES:



Recambio filtro recolector


2. RECOMENDACIONES:

Utilizar el aspirador recolector de hueso únicamente durante el proceso de fresado y solo para este proceso, use otra cánula para la sangre y la saliva y acerque la cánula lo máximo posible a la fresa.

3. PRECAUCIONES

No utilice el Recambio de filtro desechable si el empaquetado está dañado. Usar el Recambio de Filtro desechable en condiciones asépticas. El hueso recogido debe usarse de forma inmediata

4. SECUENCIA DE USO

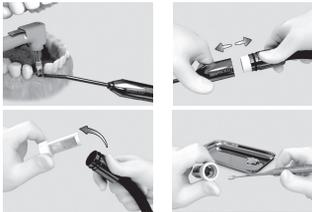

5. CONTRAINDICACIONES:

No se utilizarán aquellos productos que hayan variado sus propiedades con el uso, de forma que no sean seguros para las funciones que están indicadas.

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para la seguridad y efectividad del instrumental se sugiere encarecidamente que el producto sea utilizado por personal cualificado. ESTAS INSTRUCCIONES NO TIENEN POR OBJETO SER UN SUSTITUTIVO DE UNA ADECUADA FORMACIÓN. El recambio del filtro se suministra ESTÉRIL

7. LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN:

El Filtro Recolector es estéril. Es de un solo uso. Los productos se suministran envasados individualmente. Se requiere una consideración especial para manipularlos. (Se deben usar guantes, evitar el polvo).

8. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Todas las piezas que componen el filtro recolector están fabricadas en Acero Inoxidable 303; el recambio del filtro está fabricado en una variedad de polímero.

9. EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Toda la información sobre el producto está en la etiqueta. El embalaje del producto se realiza de forma individual.

No se necesitan condiciones especiales de almacenaje ya que las materias primas utilizadas son estables en condiciones de presión y temperaturas normales. Se recomienda almacenar entre temperaturas entre 18°C y 50°C y un límite de humedad por debajo del 70%.

10. SÍMBOLOS ETIQUETADO



Atención a las normas de uso



Marcado CE



Lote



Referencia



Fabricante



No usar si el envase está dañado



Esterilizado por rayos Gamma



Un sólo uso, no reutilizar

FABRICANTE:

MOZGRAU[®], S.A.

C/ Santiago López González, 7
47197 VALLADOLID (ESPAÑA)

Tel. +34 983 312 602 fax: +34 983 304 021

e-mail: aventas@ticareimplants.com

www.ticareimplants.com

Rev 2: 17 09 2019