



ticare

Dr. Luis Antonio Aguirre

Médico Estomatólogo,
especialista en Periodoncia.



Dra. Silvia Martín

Odontóloga, especialista en
Prótesis y Estética Dental.



COLOCACIÓN DE UN IMPLANTE TICARE PERIO HYBRID 4,25x13 MM EN UN PACIENTE PERIODONTAL

La utilización de implantes de superficie híbrida (mecanizada-texturizada) puede estar indicada en pacientes con una alta susceptibilidad a la periodontitis.



Imagen pre tratamiento



Imagen post tratamiento a 7 meses
de la colocación de la prótesis
definitiva



Fig. 1 Imagen intraoral de la situación inicial



Fig. 2 Imagen radiográfica de la situación inicial, se observa fractura de la pieza 14



Fig. 3 Imagen radiográfica de la fractura de la raíz y reabsorción radicular

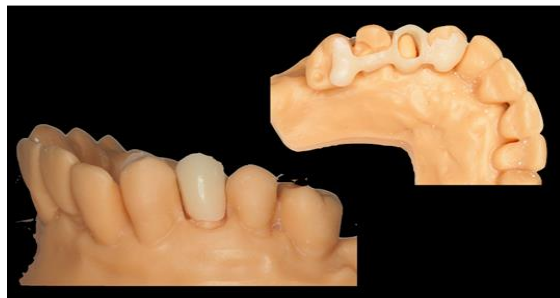


Fig. 4 Provisional en cáscara de huevo sobre modelo para posterior provisional inmediato sobre implante con aletas de posicionamiento



Fig. 5 Colocación implante Ticare Perio Hybrid Quattro 4,25x13 mm



Fig. 6 Colocación implante Ticare Perio Hybrid Quattro 4,25x13 mm

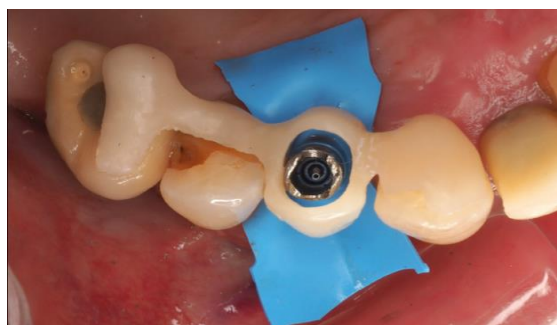


Fig. 7 Captura del pilar provisional



Fig. 8 Fijación al provisional en cáscara de huevo

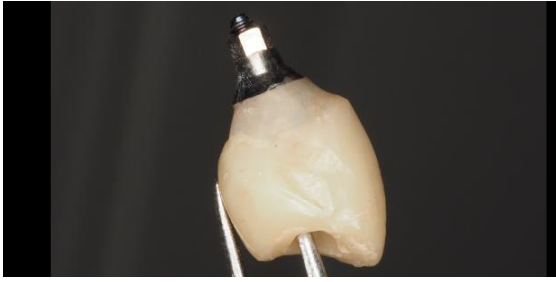


Fig. 9 Confección del perfil de emergencia



Fig. 10 Eliminación de las aletas de posicionamiento para obtener el provisional atornillado sobre implante inmediato



Fig. 11 Imagen intraoral del provisional inmediato atornillado

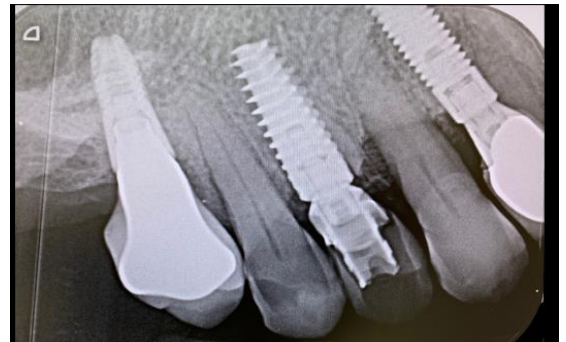


Fig. 12 Imagen radiográfica del provisional inmediato atornillado



Fig. 13 Control de oclusión



Fig. 14 Imagen intraoral de corona finalizada



Fig. 15 Imagen radiográfica de corona finalizada



Fig. 16 Final del tratamiento 7 meses después de la colocación de la prótesis definitiva