



PORADY I KONSERWACJA

To, co jest ważne dla Ciebie, **jest ważne dla nas**
To, o co Ty się troszczysz, **my troszczymy się o to**

PORADY I KONSERWACJA



Oto kilka wskazówek dotyczących podstawowej pielęgnacji implantów dentystycznych.

Jesteś w rękach pracownika służby zdrowia

Przestrzegaj wszystkich zaleceń, które ci wskażę, ponieważ będzie to miało kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia.






Podobnie jak w przypadku własnych zębów, należy utrzymywać odpowiednią higienę i zgłaszać się na regularne wizyty kontrolne zgodnie z zaleceniami lekarza.

Prawidłowa pielęgnacja pomoże zachować implanty na dłużej i zapobiec możliwym powikłaniom w przyszłości.


1

Przykładaj lód do operowanego obszaru przez 10-15 minut, zawsze pozostawiając co najmniej kilka minut przerwy między każdym zastosowaniem.

Lód należy przykładać owinięty w szmatkę lub folię, ale nigdy bezpośrednio na dziąsło lub skórę.

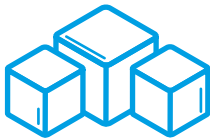

2

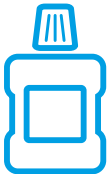


Nie płukać energicznie
ani nie wypływać przez
24 godziny po zabiegu.

Pozwoli to na
prawidłowe gojenie.

W przypadku umiarkowanego krwawienia po zamknięciu chirurgicznym należy uciskać ranę gazą i przygryzać ją przez 30 minut, aby ponownie utworzyć skrzep. W przypadku silnego krwawienia należy skontaktować się z kliniką.

3

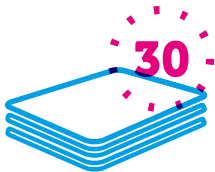

4



Nie należy się niepokoić,
jeśli kilka godzin po
operacji wystąpi obrzęk
lub zasinienie.
Są to normalne
konsekwencje.

Brak
forsownych
ćwiczeń
fizycznych
przez siedem
dni po
zabiegu.

5



6

**Śpij z głową
uniesioną
do góry.**

Staraj się trzymać
głowę uniesioną
przez cały czas.



Przez pierwsze siedem dni należy stosować miękką i ciepłą dietę (unikać wysokich temperatur żywności).

Zaleca się spożywanie produktów łatwych do przeżucia i o temperaturze pokojowej lub zimnych.

7



8



Przez pierwsze siedem dni nie należy palić tytoniu ani spożywać napojów alkoholowych, gazowanych lub wysokosłodzonych.

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji i zaleceń dotyczących leków (antybiotyków, leków przeciwzapalnych i/lub przeciwbólowych), które zostały podane w klinice.







ticareimplants.com

[@ticareimplants](https://www.instagram.com/ticareimplants)



Phone: +34 983 211 312

Email: sales@ticareimplants.com