



CONSILIERE ȘI ÎNTREȚINERE

Ceea ce contează pentru tine contează pentru noi
Nouă ne pasă de ceea ce îți pasă ție

CONSILIERE ȘI ÎNTREȚINERÉ



Acestea sunt doar câteva indicații
pentru îngrijirea de bază a
implanturilor dumneavoastră dentare

Vă rugăm să rețineți că sunteți sub
îngrijire profesională.

Urmați toate instrucțiunile de îngrijire
recomandate de medicul dvs. dentist,
deoarece acestea sunt esențiale
pentru succesul tratamentului
dumneavoastră.






Exact ca pentru dinții proprii, trebuie aplicate măsuri de igienă specifică. Pentru a evita eventualele complicații, trebuie să vă prezentați la consultul periodic recomandat de medicul dentist.


1

Pentru a reduce inflamația se recomandă aplicarea de gheață pe obraz în apropierea zonei în care au fost inserate implanturile. Aplicați-o timp de 10-15 minute, apoi faceți câteva minute de pauză și repetați de câte ori este posibil.

Înfășurați gheața într-un material textil pentru a evita contactul direct cu pielea.

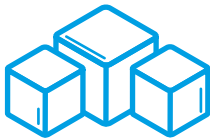

2

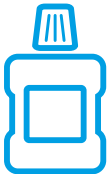


Nu clătiți energic și nici
nu scuipați în primele 24
de ore postoperatorii
pentru a permite o
vindecare corectă.

Mușcați ferm tifonul care a fost aplicat pe rană timp de 30 de minute pentru a reduce sângerarea. În cazul în care sângerarea persistă după îndepărtarea tifonului, repetați procedura.

În caz de sângerare abundentă, contactați clinica dentară.

3

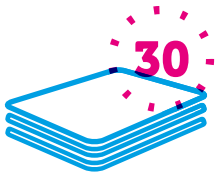

4



Nu vă alarmați dacă
apar umflături sau
vânătași la câteva ore
după operație.

Sunt **consecințe
normale.**

Nu practicați
exerciții fizice
intense în prima
săptămână
după operație

5



6



În prima zi după operație, pentru a reduce umflarea și sângerarea se recomandă să dormiți cu capul mai ridicat față de restul corpului.

Încercați să țineți capul mereu sus.

În primele șapte zile după operație este indicat să consumați alimente de consistență moale.

Evitați mesele sau băuturile calde în ziua operației.

7



8



Nu fumați și nu
consumați băuturi
alcoolice,
carbogazoase sau
foarte dulci **în primele
șapte zile.**

Urmați cu atenție
instrucțiunile și
prescripțiile de
medicamente
(antibiotice,
antiinflamatoare
și/sau analgezice)
indicate de medicul
dentist

9







ticareimplants.com

[@ticareimplants](https://www.instagram.com/ticareimplants)



Phone: +34 983 211 312

Email: sales@ticareimplants.com